

TINUS

スタートアップマニュアル

Ear Digital

はじめに

本日お貸出しする機械は 2 種類の音を織り交ぜて再生し

耳鳴を抑制する目的で開発されています

設定により様々な音色を組み合わせで鳴らすことができます


たくさんの機能が盛り込まれた機械ですが

貸出時は患者様に最適な音が鳴るように設定しています

最初は簡単な機能からはじめてみましょう

	はじめに		1
	各部の名称		2
	充電		3
	電源		4
	音量		5
	音色		6
		音の種類.....	7
		音の変更.....	8
	タイマー		11

各部の名称

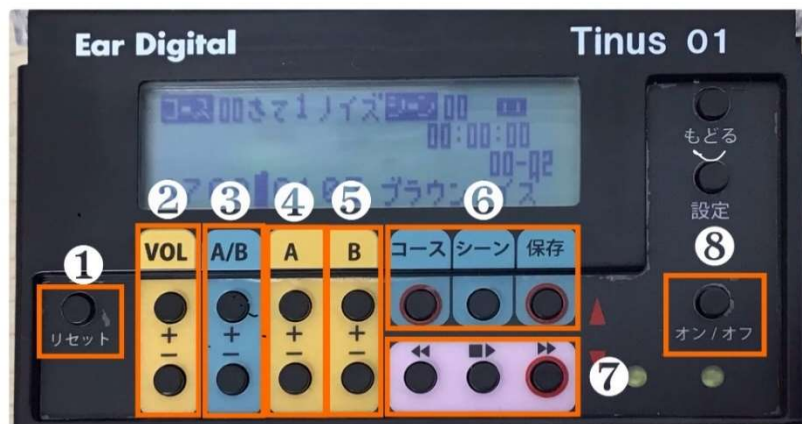

- | | |
|------------|---|
| ① リセットボタン | 最後に「保存」した設定に戻ります
画面が固まったり動作不安定時に使用します
押すとリセットされ 電源が切れます |
| ② 音量ボタン | 音量を調節します |
| ③ バランスボタン | 音 A と音 B のバランスを調整します |
| ④ 音 A | 音 A の種類を選びます |
| ⑤ 音 B | 音 B の種類を選びます |
| ⑥ コース関連ボタン | コースやシーンの設定に使用します |
| ⑦ 再生関連ボタン | 組合わせたコースを再生する時使用します |
| ⑧ オン/オフボタン | 電源ボタンです 押すと ON 長押しで OFF |

充電

本機は充電して外出時にもお使いいただけます。
USB ケーブル(マイクロ B)で充電します。
コンセントから充電する場合は付属の AC アダプターをご利用ください。




図の位置に
マークを上向きに
しっかり奥まで
挿入してください

電池残量エリアにおおよその残量が表示されます。

- | | |
|--|-------|
| | 満充電 |
| | 約50% |
| | 残量わずか |

電源

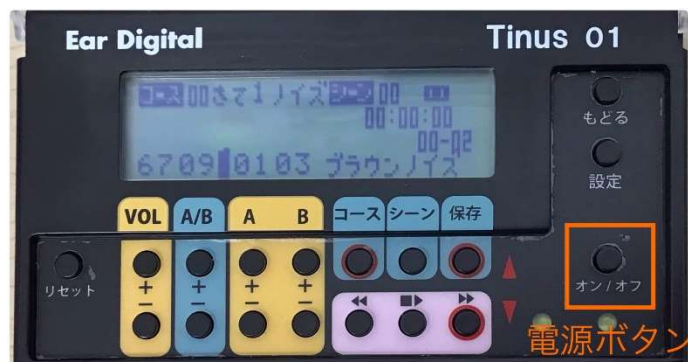

電源を入れる

電源を入れるには電源ボタンを 1 回押します。

電源を切る

電源を切るには電源ボタンを **長押し** します。

音量

初期設定では 耳鳴外来で検査をした際の患者様の耳鳴にあった音を鳴らすよう設定してお渡ししています。

しかし、ご使用になる環境によって、適した音量は変化しますので、適宜 ご利用環境に応じた音量にしてご使用ください。

例 1: 就寝前の静かな寝室でのご使用は小さな音で聴く

例 2: 耳鳴がひどくなった際に大きめの音にして短時間聴く



「VOL」の「+」を押すと大きく、「-」を押すと小さくなります。

表示画面の 左下に 音量が 数字で表示されています。

01 から 84 まで設定できます。

音色

本機では 2 種類の音を同時に鳴らしています。

初期設定では患者様の状態に応じた音を設定していますが、

ご自身で自分の体調や耳鳴にあわせて、変更することも可能です。

ご自身にあった音を探してみてください。

本機に収録されている音は次のページの通りです。

表示画面の番号と連動しています。

1	ホワイトノイズ		ノイズ	31	なみうちぎわ	○	環境音
2	ピンクノイズ			32	あわぶく		
3	ブラウンノイズ			33	かいがんせん	○	
4	ブルーノイズ			34	あらし		
5	パープルノイズ			35	ウグイスたち	○	
6	グレイノイズ			36	あめとトリ		
7	125Hzノイズ			37	かわとトリ	○	
8	250Hzノイズ			38	ウグイスかわ	○	
9	500Hzノイズ			39	ウグイスたち		
10	750Hzノイズ			40	かわウグイス	×	
11	1000Hzノイズ			41	あきのむし	○	
12	1500Hzノイズ			42	あきのムシ	○	
13	2000Hzノイズ			43	コオロギ	○	
14	3000Hzノイズ			44	ざっとう		
15	4000Hzノイズ			45	ST45 ラ6		トーン
16	6000Hzノイズ			46	ST46 ラ#6		
17	8000Hzノイズ			47	ST47 シ6		
18	ざっとう		環境音	48	ST48 ド7		
19	あらし			49	ST49 ド#7		
20	あめ1			50	ST50 レ7		
21	あまだれ			51	ST51 レ#7		
22	ざあざあぶり	○		52	ST52 ミ7	○	
23	シトシトあめ			53	ST53 ファ		
24	あまあし	○		54	ST54 ファ#7	○	
25	にわかあめ			55	ST55 ソ7		
26	ポタポタあめ	○		56	ST56 ソ#7	○	
27	しみず			57	ST57 ラ7		
28	あめのさわ	○		58	ST58 ラ#7	○	
29	ながれみず	○		59	ST59 シ7	○	
30	うみべ	○		60	ST60 ド8	○	

音Aを変更するには



音 A を変更するには 上図青枠の「A」「+」「-」ボタン を使用します。
(表示画面の数字のすぐ下のボタンが連動しています。)

前のページの音色の表を確認し 設定したい音の番号を確認します。
液晶画面に表示されている 青枠部の 音A の数字を
ボタンを使用し 設定したい番号に合わせます。

音Bを変更するには

音Bの変更も 上図 緑枠の「B」「+」「-」ボタン を使用し
音Aと同様に變更してください。

音Aと音Bのバランス

音Aと音Bのバランスは

前ページ図赤枠の「A/B」「+」「-」ボタンで變更することができます。

「10」であれば、音A と 音Bが1:1の割合で鳴っている事になります。

設定とリセット

色々變更して元に戻したくなった時は

前ページ図 オレンジ枠 の「リセット」ボタンを押すと
貸出時の設定に戻すことができます。

また お気に入りの組み合わせがみつかり

常時その設定で使用したくなりましたら、

オレンジ枠の「保存」ボタンを押して設定を保存できます。

このボタンを押すことで、選んだ設定が、初期設定となります。

「保存」ボタンを押さない限りは一時的な音の變更と考えてください。

都度、音を變更して利用する場合は 保存の必要はありません。

タイマー


本機は 自動オフタイマーがついています。

貸出時は 30 分に設定していますが利用状況に合わせ変更可能です。



終了時間を変更するには
まず左図の
コースボタンを押します

右図オレンジ枠 END の
下にある VOL 大 ボタンを
押します

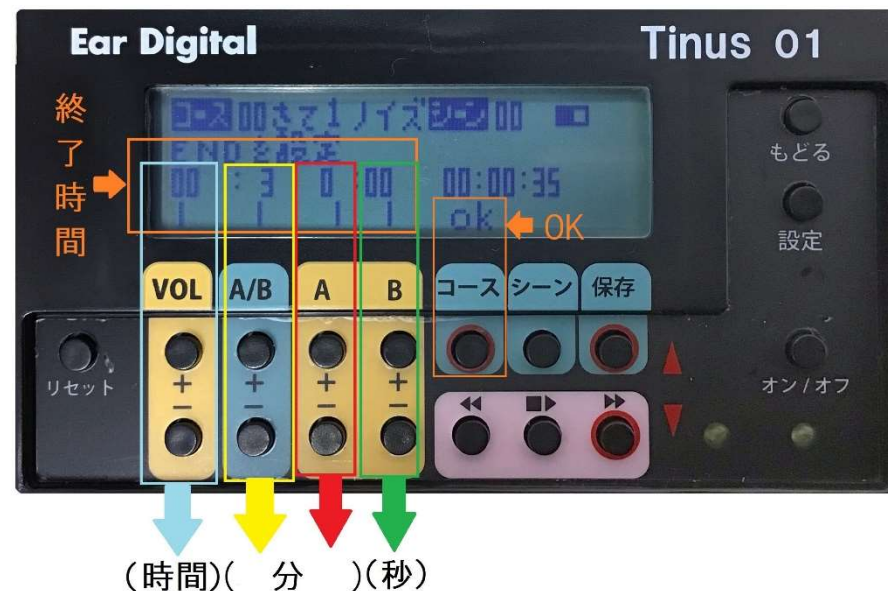

30 分の場合

00:30:00 と表示されます。

画面の数字の下ボタンが連動していますので変更していきます

例 1: 45 分に変更する場合

- VOL + を 1 回押すと 01:30:00 となります
- A/B + を 1 回押すと 01:40:00 となります
- A + を 5 回押すと 01:45:00 となります

例 2: 2 時間に変更する場合

VOL 大を 2 回押すと 02:30:00 となります

トーン小を 3 回押すと 02:00:00 となります。

最後に「**コース**」ボタンを押して設定完了です。

スリープモード(STOP!! Timer) から復帰するには

リセットボタンを押して 再度電源を入れなおしてください。